

# GUIDE DE REMPLACEMENT DES TIGES DE LA D-SAD

## REPLACER LES TIGES EST RAPIDE ET FACILE.

RAPPEL : LES TIGES PLUS COURTES AUGMENTENT LA PROTRUSION  
LES TIGES PLUS LONGUES DIMINUENT LA PROTRUSION

### INSÉRER LES TIGES

**1:** Fixez les deux tiges à la gouttière du bas (celle avec les triangles) en vous assurant de placer les inscriptions de longueurs face à l'intérieur.

Pour ce faire, alignez la tête des tiges avec la forme correspondante des ancrages et appuyez fermement avec la base de votre pouce pour que la tige s'insère dans l'ancrage du triangle.

Une fois attachées, les tiges seront orientées vers l'arrière et parallèles à la gouttière du bas.

**2-3:** Commencez en attachant la tige du côté de votre main dominante à la gouttière supérieure. Avancez la gouttière supérieure dans sa position.

Faites pivoter la tige libre pour la placer face à l'ancrage de la gouttière supérieure.

**4-5:** En raison de la rigidité de l'orthèse, la dernière insertion peut être plus difficile.

Placez le côté de la gouttière du haut n'ayant pas de tige attachée à un angle de 70° à 90° par rapport à la gouttière du bas.

Alignez la tête de la tige avec l'ancrage et pesez fermement. Une fois la tige insérée, faites pivoter la gouttière et remplacez-la dans sa position normale.



### RETIRER LES TIGES

**6-7-8:** Placez la gouttière du haut à environ 90° par rapport à celle du bas. Glissez le bout de l'ongle entre la gouttière et la tige et tirez. Faites pivoter la tige vers l'arrière, placez le bout de l'ongle entre la tige et le triangle, et tirez.

Pour l'autre, alignez les têtes des tiges avec les ancrages, et tirez.

